



Б.А. Кулигин

**Инструкция**  
по утилизации использованных одноразовых  
медицинских масок и перчаток

После 2-3 часов использования **одноразовую** медицинскую маску необходимо утилизировать:



1. аккуратно взять за ушные крепления и потянуть, не касаясь передней части маски;
2. снять маску, стараясь не задеть использованным изделием лицо;
3. свернуть маску наружной стороной внутрь;
4. сразу положить одноразовую маску в полиэтиленовый пакет и плотно его завязать;
5. поместить пакет в мусорный контейнер, а руки тщательно вымыть с мылом или обработать антисептиком, уничтожающим вирусы и бактерии;
6. перед использованием нового комплекта средств индивидуальной защиты тщательно вымыть лицо с мылом, если это возможно.
7. при использовании медицинской маски ее нельзя опускать на шею, так как это увеличивает риск заражения коронавирусом.
8. Аналогичным образом утилизируются защитные медицинские перчатки:  
перчатки снимают и помещают в полиэтиленовый пакет, и, закрыв его герметично, выбрасывают в специально оборудованный контейнер.
9. В случае использования **многоразовой** защитной маски через каждые 2-3 часа использования ее необходимо заменить на новую (продезинфицированную).
10. Маску снимают, потянув за ушные крепления, после чего упаковывают в герметично закрывающийся пакет. В последствии маску обрабатывают в хлорсодержащем растворе, стирают и тщательно проглаживают утюгом.
11. Пакет, в котором временно хранилась использованная многоразовая маска, завязывают герметично и бросают в мусорное ведро или в специально оборудованные контейнеры.
12. По мере заполнения емкости (контейнера) для использованных масок и перчаток, но не реже двух раз в день, работники клининговой компании, надев одноразовую маску и перчатки заменяют наполненный пакет новым, предварительно протерев емкость дезинфицирующим раствором.  
Утилизируют как бытовой мусор.

# COVID-19


## МАСКИ – ЭТО СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ БАРЬЕРНОГО ТИПА

РОСПОТРЕБНАДЗОР  
Единый консультационный центр  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43


Медицинскую одноразовую маску после однократного использования можно выбросить как обычный бытовой мусор

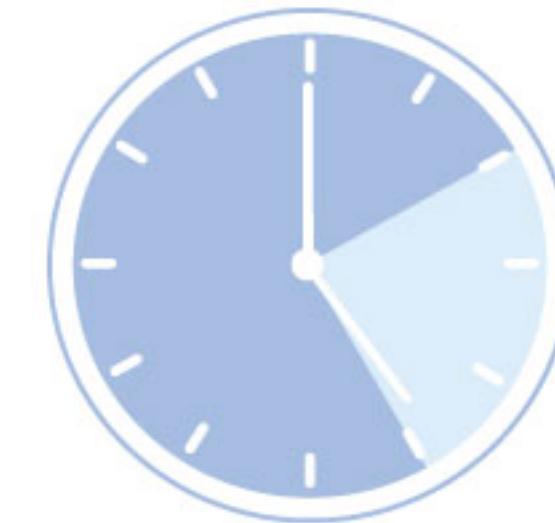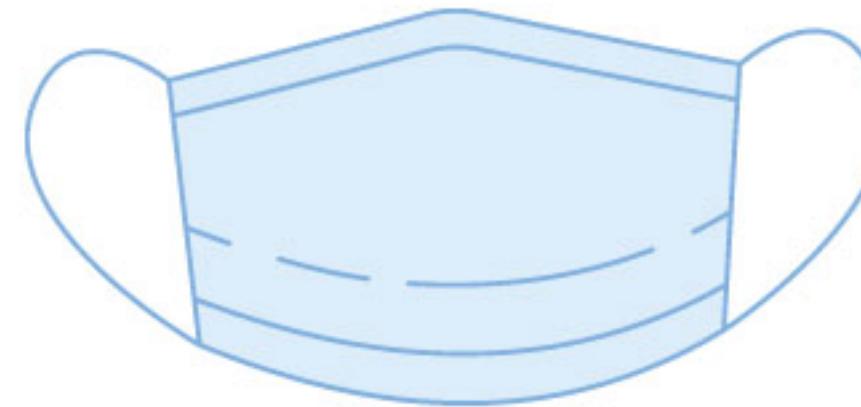


**2-3**  
часа

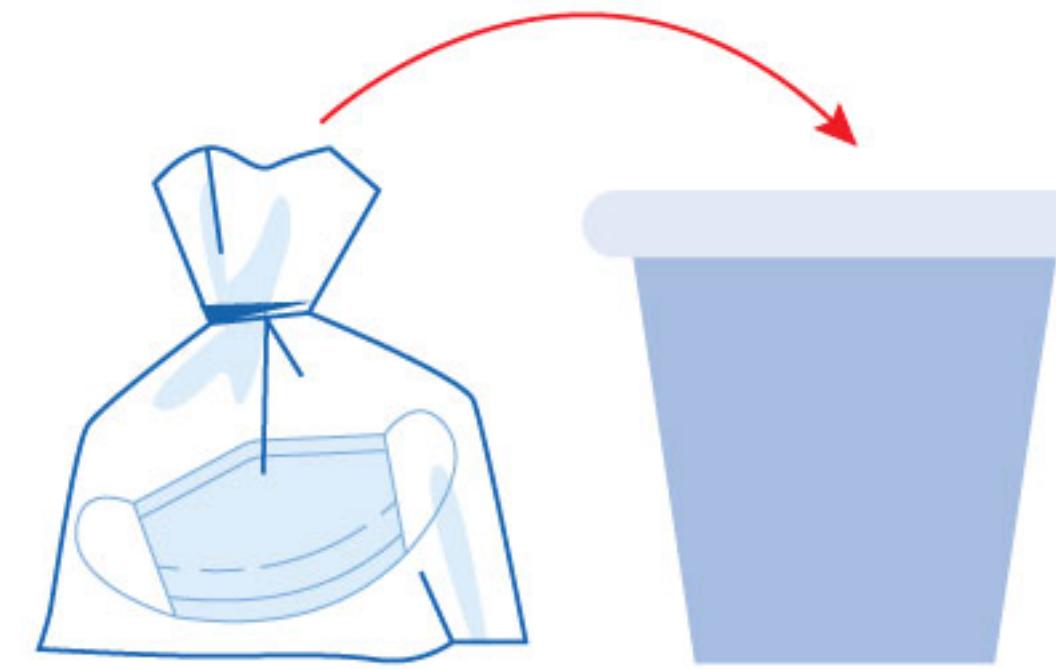

Многоразовая маска не является медицинским изделием, ее можно использовать повторно только после специальной обработки

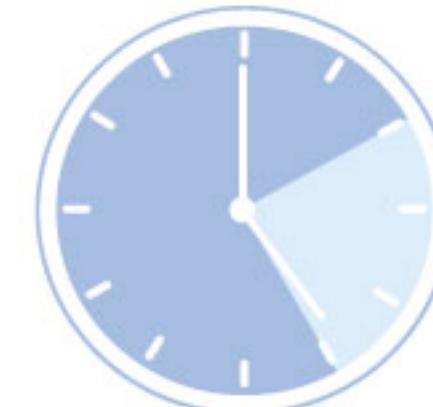

**2-3**  
часа

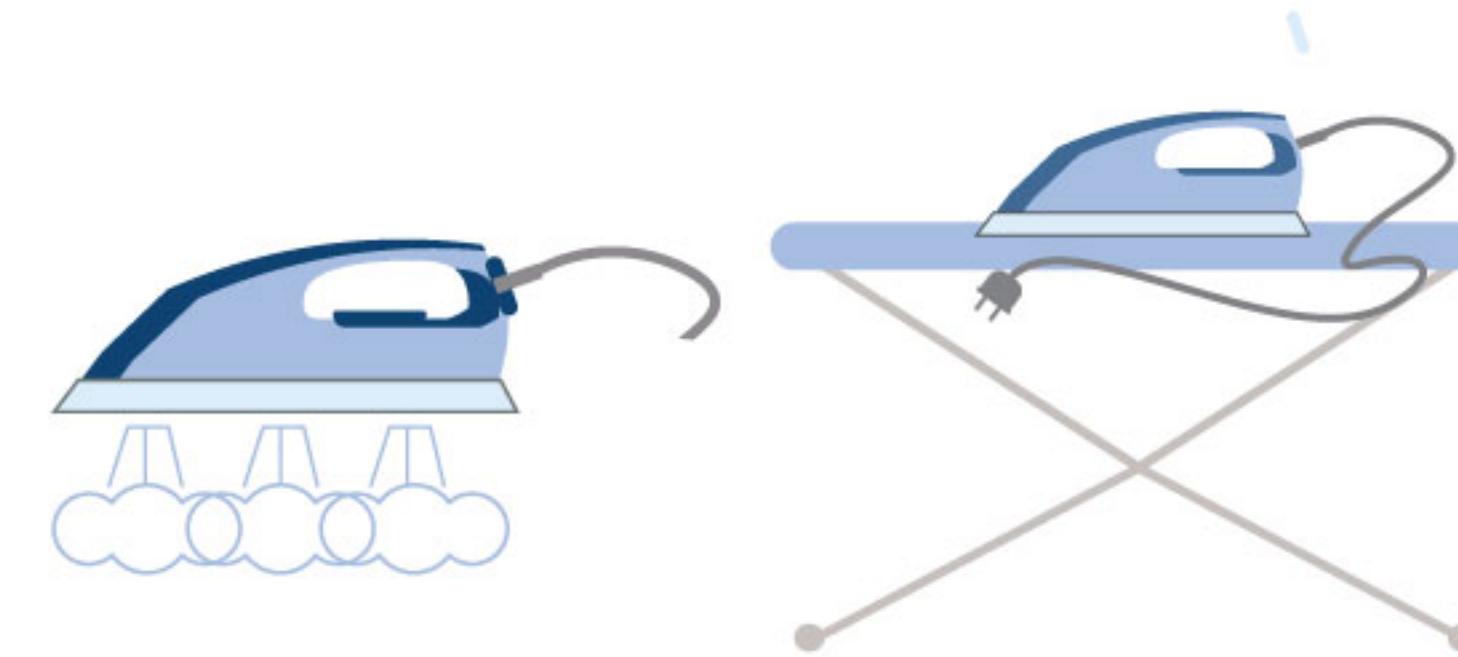

**ВАЖНО!** Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики  
(избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов),  
и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях